

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 16:00

Link do produktu: <https://www.lakierowo.pl/velox-top-af-grapefruit-preparat-do-dezynfekcji-narzedzi-1-l-p-2074.html>



Velox Top AF Grapefruit - preparat do dezynfekcji narzędzi 1 L

Cena	36,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MEDI-SEPT

Opis produktu

Cechy produktu

- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN14885).
- Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki grzyby, wirusy w czasie 30 sekund.
- Nie zawiera aldehydów i QAV.
- Preparat gotowy do użycia.

Korzyści dla użytkownika

- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- Oszczędność czasu przy wysokiej skuteczności.
- Idealny efekt myjący, bez odbarwień i smug.
- Przyjemność w użytkowaniu.
- Szybkość i wygoda w stosowaniu.

Zastosowanie

- Preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni, sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością.
- Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych.
- Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.
- Posiada przyjemny cytrynowy zapach.

Skuteczność mikrobiologiczna

- Bakterie (w tym MRSA) wg EN 14885; EN 1040; EN1276: 30 sekund (niski stopień zanieczyszczeń), 1 minuta (wysoki stopień zanieczyszczeń)
- Grzyby (Candida albicans) grzyby wg EN 14885 , EN 1275, EN 1650: 30 sekund (niski stopień zanieczyszczeń), 1 minuty (niski stopień zanieczyszczeń)

- Prątki gruźlicy wg EN 14885 , EN14348: 30 sekund (niski stopień zanieczyszczeń), 1 minuta (wysoki stopień zanieczyszczeń)
- Wirusy osłonkowe (np.: HBV, HIV, HCV, wirus grypy A, B, C Veccinia, BVDV, Herpes simplex) wg BGA(RKI)/DVV: 30 sekund (z zanieczyszczeniem)
- Wirus Adeno wg EN 14476: 30 sekund
- Wirus Noro wg EN 14476: 30 sekund
- Wirus Rota wg EN 14476: 1 minuta

Sposób użycia

- Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie.
- Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug.
- Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe).

Skład

100 g zawiera:

- 37,0 g propan-1-ol
- 24,0 g alkohol etylowy

Opakowanie

Butelka 1 L ze spryskiwaczem